

Voor een nuchtere kijk op rijden onder invloed

The DRUGLAB

Drugstest voor het detecteren van sporen van drugs op oppervlaktes en in vloeistoffen. De DRUGLAB detecteert GHB, Rohypnol en amines wat de werkzame stof is in de meeste synthetische drugs waaronder, Cocaïne, Heroïne, LSD, Ketamine, Ecstasy, Methamphetamine en meer.



Gebruiksaanwijzing:

De DRUGLAB kan gebruikt worden voor het testen van vloeistoffen en poeders.




Voor het testen van vloeistoffen gebruik je een droog wattenstaafje.



Voor het testen van poeder maak je het wattenstaafje eerst nat met water.

1. pak het wattenstaafje uit de verpakking
2. neem een sample door in de vloeistof te dippen of het oppervlak te veegen
3. plaats het wattenstaafje op het testvlak en rol het staafje over het vlak tot deze nat is van de vloeistof.
Herhaal dit proces voor beide test vlakken:
GEEL: controleert op Rohypnol en drugs die amines bevatten
ROZE: controleert op Street GHB
4. Lees het resultaat door dit te vergelijken met de resultaten op de RESULTS CARD

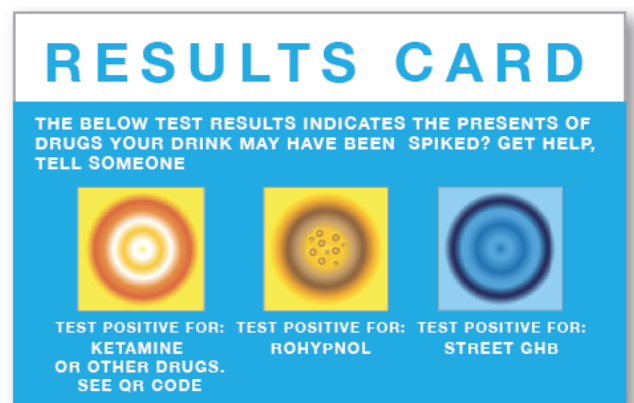

Indien de test gebruikt wordt voor het controleren van drankjes in uitgaansgelegenheden dan is een positieve test reden om hulp te zoeken bij bekenden, hulpverleners of barpersoneel. **Uw drankje kan zijn besmet met drugs u bent in gevaar haal hulp.**

Als de test als screening test wordt gebruikt voor het controleren op sporen van drugs dan kan een positieve test opgestuurd worden naar een forensisch laboratorium voor nader onderzoek.

Belangrijkste eigenschappen:

- Direct resultaat
- Niet giftig, veilig in gebruik
- Geen training nodig, eenvoudig toe te passen in iedere omgeving
- Testresultaat kan door lab verder worden onderzocht en dienen als bewijslast
- Klein, licht en makkelijk mee te nemen

Verpakking bevat:

- Testkaart met instructie
- Resultatenkaart
- Wattenstaafje
- Mogelijkheid tot personalisatie

Niet te gebruiken voor:

De DRUGLAB is een niet-invasieve test dus kan niet gebruikt worden voor het testen van bloed, zweet en urine

Doelgroepen:

Bareigenaren, postorderbedrijven, wethandhaving, beveiliging, ambulance personeel, festivalbezoeker, zakenreiziger, iedereen die een test op de meest gangbare drugs wilt kunnen doen.

Drugs positief getest door de DRUGLAB:

Amphetamine	Methadone
Benzphetamine	Methamphetamine
Benzylpiperazine	Morphine
Cocaine	Opium
Codeine	Phencyclidine (PCP)
Dextromethorphan	Procaine
Diphenhydramine	Promethazine
Doxylamine	Thebaine
Heroin	Tryptamine
Hydrocodone	Tyramine
Ketamine	Lidocaine
LSD	
Mephentermine	

Rohypnol detectie

Rohypnol is onoplosbaar in alle dranken. Als een Rohypnol-pil wordt vermalen en in een drankje wordt gedaan, zinken de meeste deeltjes naar de bodem van het glas, sommigen lossen op en andere blijven achter als een schuim op het oppervlak van de drank. Wanneer het staafje in de drank is ondergedompeld, zullen sommige van deze deeltjes worden opgenomen en, wanneer het staafje tegen het K + -papier wordt gedrukt, zullen de deeltjes als afzonderlijke deeltjes verschijnen. Dat wil zeggen, een aantal individuele oranje deeltjes geven de aanwezigheid van Rohypnol aan.

GHB detectie

De G-test is ontwikkeld om een positieve drank te detecteren als deze 1000 mg (1 gram) ongeoorloofde GHB per 250 ml drank bevat. De gevoeligheid verschilt van de ene drank tot de andere. De G-test is niet geformuleerd om te reageren met laboratoriumnormen of controles, alleen illegale GHB.

Dranken die zijn gecontroleerd:

De volgende dranken geven een negatief resultaat op de G en K+ test. De DRUGLAB identificeert in deze producten de volgende hoeveelheden drugs.

Drank 250 ml	Illicit GHB Detectie in miligram (mg)	Ketamine Detectie, mg
Archers schnapps aqua raspberry	1000	200
Bacardi breezer cranberry	1500	200
Billy boy energy drink	1500	200
Chardonnay	1000	200
Coke	1500	166
Corona Beer	1000	336
Crabbies green ginger wine	1000	200
Dragon Ice strong white cider	1500	336
Fosters Beer	1000	336
Gin	1500	200
Gin + Tonic	1500	200
Goldwell snowball advocaat lime lemonade	1000	200
Guinness	1500	200
Hardcore triplex ultimate kick	1000	200
Lemonade	1000	200
Malibu + fruit juice	1500	200
Malibu white rum straight	1000	200
Metz citrus twist	100	200
Napoleon Brandy straight	1000	200
Orange Juice	1500	200
Pernod Hex blackcurrant / lime	1000	200
Red wine cabernet sauvignon	1500	200
Red wine merlot	1500	166
Reef Vodka Blackcurrant + Raspberry	1000	166

Reef vodka pear/grape	1000	200
Reef Vodka Pineapple / citrus	1000	166
Scotch + Cola	1000	200
Smirnoff Black Ice Vodka	1000	200
Soda water	1000	200
Soda water + dash of lime	1000	200
Tango orange	1000	200
Tequila vodka red bull	1500	200
Tiger Beer	1500	336
Tomato Juice	1500	200
Tonic water	1500	200
Vibe vodka blueberry	1500	200
Vodka + lemonade	1000	200
Vodka + Orange Juice	1000	200
Vodka straight	1000	200
Vodka Tequila Red Square	1500	200
Water	1000	125
Whiskey + Soda water	1000	200
Whiskey scotch straight	1000	200

Disclaimer

De Druglab wordt geleverd door Alcoline onder exclusief recht van Druglab118 ltd.

Op dit product worden geen enkele andere verklaring of garantie geboden dan die hierboven is uiteengezet. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade en alle andere schade voor zover wettelijk toegestaan. De aansprakelijkheid van de fabrikant voor een defect product is beperkt tot vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs.

Producent:

Het product wordt onder licentie vervaardigd door SureScreen Diagnostics Ltd